

Istruzioni per l'uso

Tox-Cup (CE Uso Forense) 5 o 7 gruppi droga + Anti-adulteranti+ temperatura

1. Utilizzare il bicchiere per raccogliere l'urina fino alla quantità di 3/4 circa del contenitore.
2. Aprire il tappo sigillato ed avvitarlo immediatamente al contenitore.
3. Adagiare il contenitore in orizzontale facendolo appoggiare sui piedini predisposti sul lato laterale del bicchiere.
4. Attendere 2 minuti.
5. leggere i risultati **entro i 10 minuti** e non oltre 45 minuti.



Interpretazione del risultato:

Test Negativo : comparsa della riga, anche se appena velate, sulla banda corrispondente alla sostanza.


Test Positivo : non deve comparire la riga sulla parte bianca corrispondente alla banda della sostanza

Test non valido o alterato: nelle due bande corrispondenti alla " C " deve comparire "sempre" la riga; se non è presente la riga anche in una sola parte della banda "C" il test non è valido.

Cut - off

<input type="checkbox"/> Amfetamine(AMP) 300/1000	<input type="checkbox"/> Barbiturici 300
<input type="checkbox"/> Benzodiazepine(BZ) 200/300	<input type="checkbox"/> Cocaina (COC) 300
<input type="checkbox"/> Ecstasy (MDMA) 300	<input type="checkbox"/> Marijuana (THC) 50
<input type="checkbox"/> Metadone (OPI) 300	<input type="checkbox"/> Metamfetamine (MET) 300/500
<input type="checkbox"/> Oppiacei (OPI) 300/2000	<input type="checkbox"/> Oxycodone 100
<input type="checkbox"/> Fencyclidine (PCP) 25	

Esempio di **test positivo**
al gruppo THC (marijuana, ecc.)
e negativo a tutti gli altri gruppi

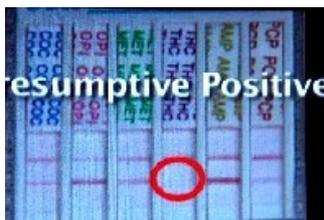

TEST ANTI-CONTRAFFAZIONE DELL'URINA
INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Adulteration Test Pads

	Abnormal	Normal	Abnormal
OX*			
PH	2-3	4 5 10	>11
CR (mg/dL)	10	20 50 100	
NI (mg/dL) (If applicable)		0 10	≥50

IL COLORE ASSUNTO INDICA IL LIVELLO DI ALTERAZIONE DELL'URINA

Drugs-of-Abuse

Negative	Positive	Non valido

AUTO- CONTROLLO DEL TEST

Branan Medical Corporation
Alcooltest Marketing Italia
via Kennedy, 8
06083 Bastia Umbra
339.82.82.019 Fax. 075.8012.645